




MEINE WELT  
IM BLICK

# Amsler-Gitter-Test

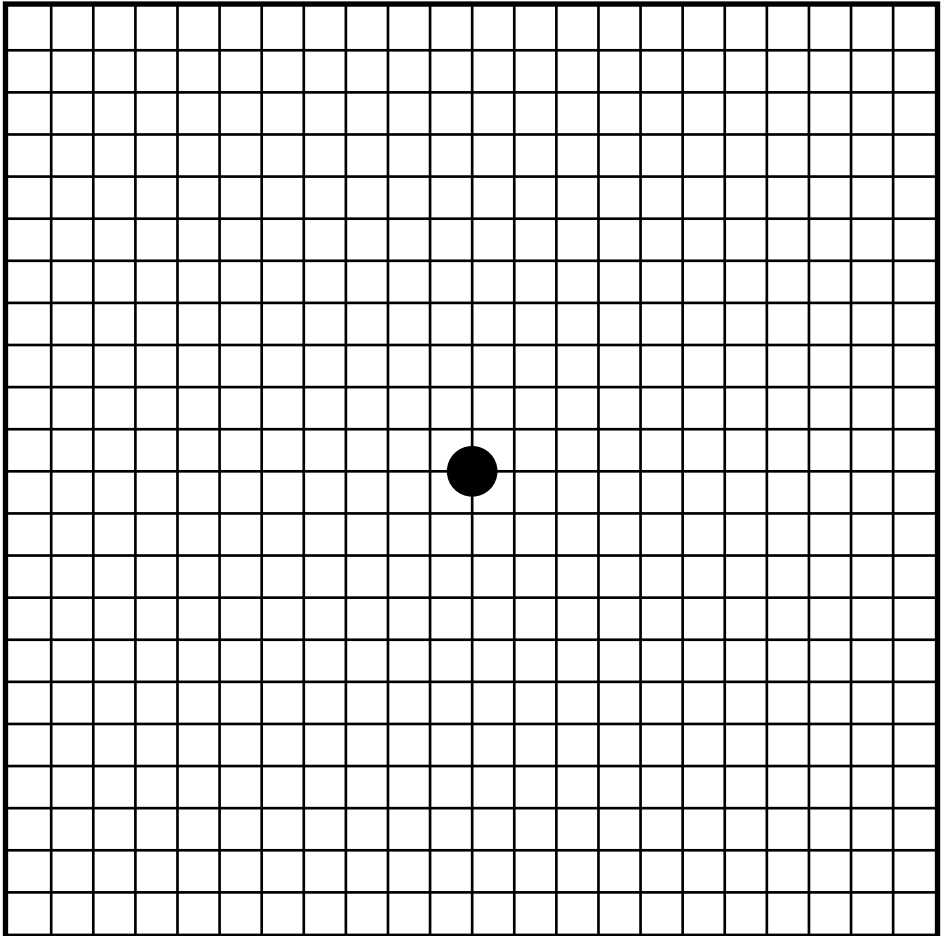

Sehen Sie die Gitternetzlinien verzerrt,  
verbogen oder verschwommen? Sehen Sie die  
Linien unterbrochen oder fehlen diese ganz?

**Dann kontaktieren Sie sofort Ihren  
Augenarzt!**

- › Tragen Sie ggf. Ihre Brille oder Kontaktlinsen.
- › Halten Sie das Amsler-Gitter ca. 30 cm entfernt.
- › Halten Sie ein Auge zu.
- › Fixieren Sie den schwarzen Punkt in der Mitte.
- › Beurteilen Sie nun, wie die Linien rund um den schwarzen Punkt aussehen:
  - Sehen Sie verzerrte, verbogene oder verschwommene Linien?
  - Erscheinen Ihnen die Linien unterbrochen oder fehlen diese ganz?

**Wenn dies der Fall ist, suchen Sie sofort Ihren Augenarzt auf!** Nur eine rechtzeitige Therapie kann Ihre Sehkraft erhalten.

- › Testen Sie nun auch das andere Auge.
- › Führen Sie den Test 1x pro Woche durch.

**Kleiner Tipp:** Heften Sie das Amsler-Gitter zur Erinnerung mit einem Magneten an Ihren Kühlschrank.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: [www.mein-augenlicht.de](http://www.mein-augenlicht.de) oder unter der Service-Hotline: **0800 550 450 1**



Der Amsler-Test ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 nach 2017/745 EU-MDR  
UDI: (01) 4260676710146 (20) WHITE (10) 1  
Hersteller: be-on-market GmbH